



# Aspiratore

## con filtro ai carboni attivi

**Per la protezione dai vapori emanati dalla lavorazione della resina in laboratorio.**

Evitare fin dall'inizio ogni problema alla propria salute.

Con questo aspiratore si semplice uso si può realizzare una vera e propria profilassi contro i crescenti rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche.



Dati tecnici	REF 072-001-00
Voltaggio	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Dimensioni (L x H x P)	250 x 210 x 240 mm

Per maggiori informazioni sull'uso dei prodotti Dentaurem per ortodonzia, è disponibile il nostro servizio di Assistenza Clienti ai seguenti numeri:

**Tel.: 051/86.25.80**

**Fax: 051/86.32.91**

**E-mail: orto@dentaurem.it**

 **Maggiori informazioni sono disponibili anche nel sito:**

**[www.dentaurem.de](http://www.dentaurem.de)**

Data dell'informazione: 10/07


Soggetto a variazioni

## Impiego dell'aspiratore

1. Accendere l'apparecchio con l'interruttore principale posto sul suo lato destro. Si illuminerà la spia di accensione e partirà l'aspirazione per circa 5 secondi.
2. Iniziando il lavoro nella specifica area, l'aspirazione si accenderà automaticamente.
3. Terminato il lavoro, l'aspirazione si spegnerà automaticamente dopo circa 5 secondi.

### Attenzione!

nel caso in cui un qualsiasi oggetto si trovasse nell'area di lavoro dell'aspiratore, verrebbe riconosciuto dall'interruttore fotoelettrico impedendo all'unità di spegnersi automaticamente.

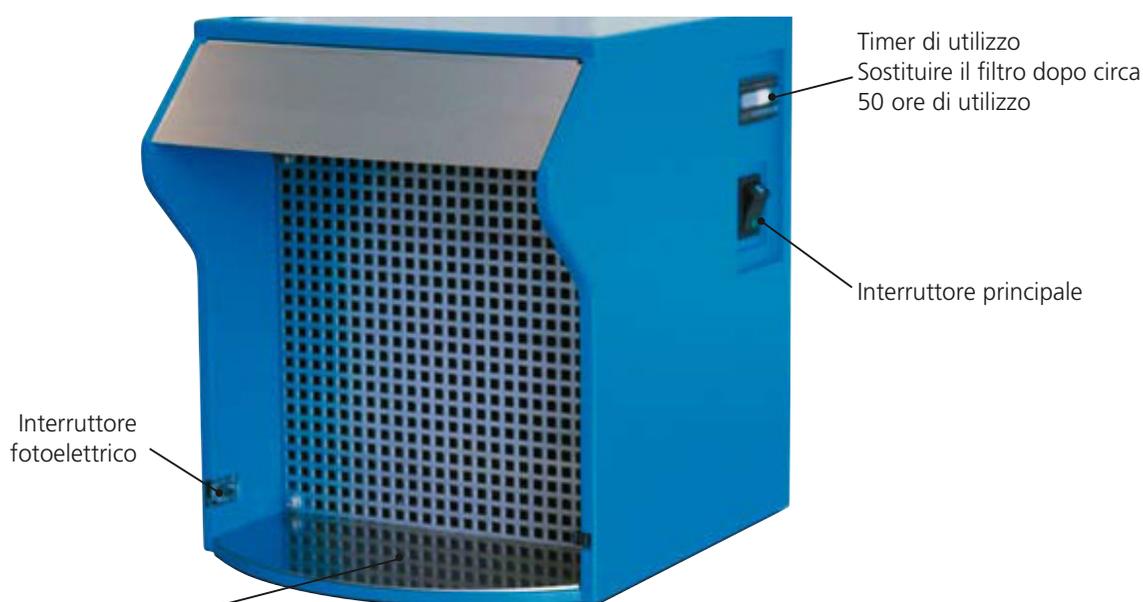

### Attenzione!

**per ragioni di sicurezza, nell'area di lavoro non deve essere impiegata una fiamma libera (rischio di ustione).**

## Conformità CE

Con il marchio CE, si conferma la piena conformità alle direttive ENV della normativa CEE 89/336/CEE, alla direttiva relativa al basso voltaggio 73/23/CEE ed alla direttiva di certificazione con il marchio CE 90/68/CEE.

In caso di modifica del prodotto senza la nostra approvazione, tale dichiarazione perderà il proprio valore e verrà inoltre meno la garanzia sul macchinario.